


# Tiras reactivas para medir glucosa en sangre

# Medi-Test Glycaemie C

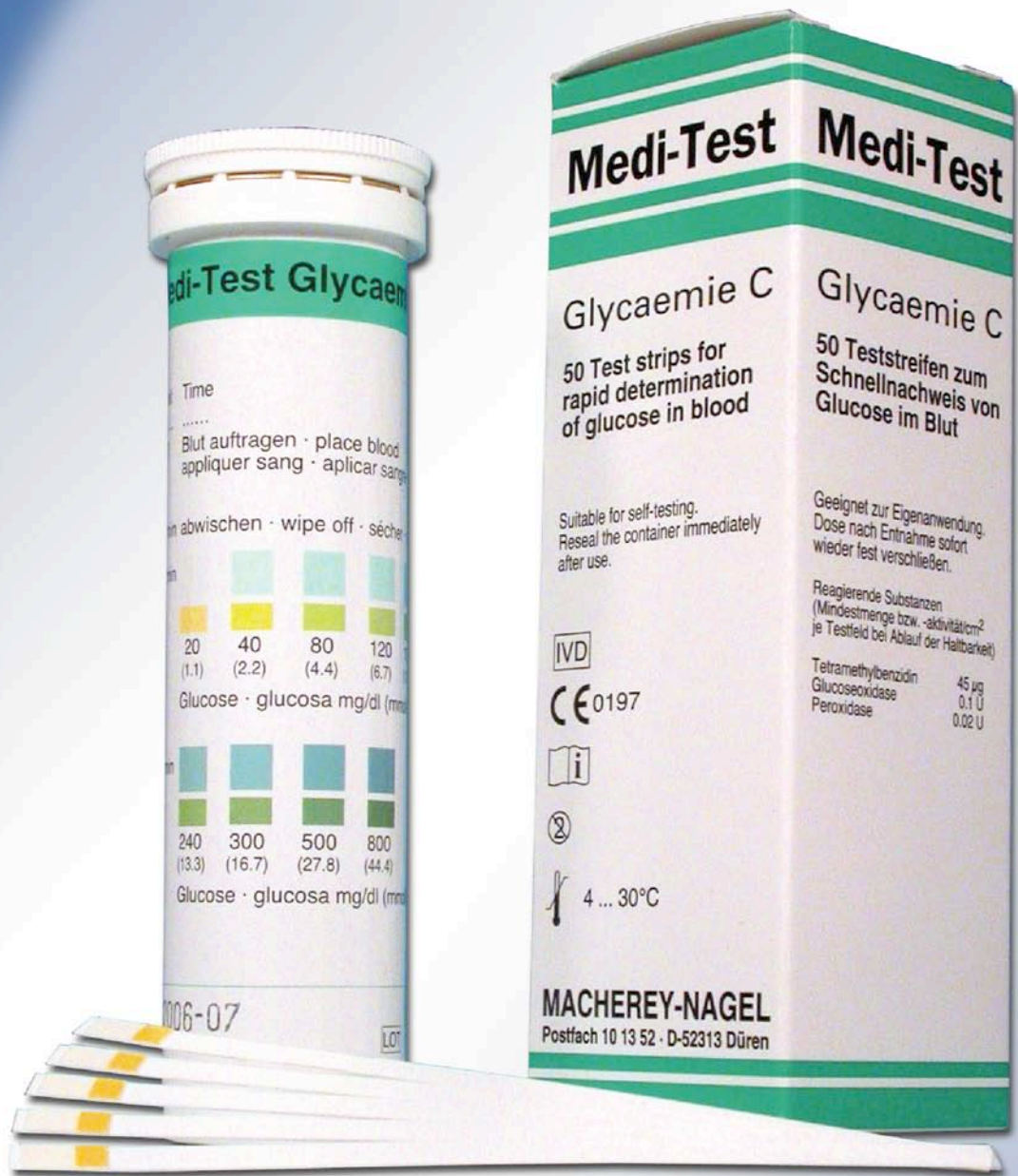

- Resultados confiables sin uso de aparato
- Determinación visual de la glucosa en sangre
  - Tubo con 50 tiras

## **Comparación de color visual**

Dos zonas de reacción proporcionan resultados confiables independientemente de lugar y hora. Para controlar el valor de medición visualizado compare el color de la zona reactiva con la escala coloreada en el envase de las tiras reactivas.

## **Manejo simple**

El uso de Medi-Test Glycaemie C es muy fácil:

- Ponga una gota de sangre en la tira.
- Después de 1 minuto, remueva la sangre.
- Espere 2-3 minutos y lea el resultado.

## **Seguridad garantizada por el mercado CE**

El marcado CE, en aplicación de la Directiva 98/79/CE, garantiza la alta calidad y la aplicación fácil.



## **Información de pedido:**

Medi-Test Glycaemie C – Tiras reactivas para la determinación visual de glucosa en sangre;  
Graduación: 20-40-80-120-180-240-300-500-800 mg/dl;  
Marcado CE para autocontrol por el propio paciente;  
Presentación: Tubo con 50 tiras

**Nº art. 928 07**

**MACHERY-NAGEL – más de 25 años de experiencia con tiras reactivas medicinales**

**MACHERY-NAGEL**

MACHERY-NAGEL GmbH & Co. KG · Postfach 10 13 52 · D-52313 Düren

Alemania y internacional:

Tel.: +49 (0) 24 21 96 90

Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99

e-mail: sales-de@mn-net.com

Suiza:

Tel.: +41 (0) 62 388 55 00

Fax: +41 (0) 62 388 55 05

e-mail: sales-ch@mn-net.com

Francia:

Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68

Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88

e-mail: sales-fr@mn-net.com



KATES100054  
FlyerGlycaemieC es1/2/0/4.2005 HU  
Printed in Germany

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)